

DESODROP[®]

**Ochranný a lubrikační****OČNÍ ROZTOK pro dospělé a děti**

DESODROP je ochranný, lubrikační, zvlhčující a zklidňující oční roztok pro péči o povrch Vašich očí, vytvořený na bázi LipozonEye (ozonizovaný rostlinný olej, sójové fosfolipidy) a Hypromelózy. Je vhodný k:

- ochraně před a po operaci očí;
- léčbě příznaků souvisejících se zánětem, včetně zánětů infekčního původu;
- podpoře regeneračních procesů po chirurgickém zákroku nebo úrazu;
- ošetření suchého oka, včetně podráždění způsobeného podmínkami okolního prostředí nebo mechanickým namáháním, jako je např. nošení kontaktních čoček.

DESODROP díky obsahu ozonizovaného oleje a lipozomů snižuje schopnost bakterií vytvářet biofilm a podporuje jeho rozklad. Biofilm představuje přirozený obranný mechanismus pro bakterie, který mohou tvořit na povrchu oka, zejména v případě odření a poranění oka, nebo na kontaktních čočkách. Odstraněním biofilmu se vytvoří nepříznivé prostředí pro množení bakterií, které jsou náchylnější k přirozené obranyschopnosti oka a vůči antibiotikům, a tím se snižují zánětlivé příznaky způsobené bakteriemi.

Obsažený rostlinný olej a lipozomy podporují stabilizaci lipidové vrstvy slzného filmu, snižují odpařování vodné vrstvy a zajišťují okamžitou úlevu pro oči.

Použitý rostlinný olej je ozonizován, a proto neobsahuje konzervační látky; díky obsahu lipozomů se dobře vstřebává a je výborně snášen.

Indikace:

DESODROP je určený jako podpora:

- v profylaxi před operací a po operaci (například katarakta, intravitreální injekce, atd.); aplikace se doporučuje tři dny před operací;
- v případě zánětlivých onemocnění rohovky (keratitida) a spojivky (konjunktivitida), včetně infekčního původu (z bakterií, virů, plísní);
- při antibiotické léčbě u dospělých i dětí;
- v případě odření, poranění rohovky, používání kontaktních čoček;
- v případě povrchových změn oka způsobených nestabilitou slzného filmu, také u pacientů s opakujícími se očními infekcemi.

Způsob aplikace:

Před použitím lahvičku protřepejte.

Aplikujte jednu nebo dvě kapky roztoku do každého oka, jednou nebo vícekrát denně dle potřeby nebo podle pokynů lékaře.

Přípravek lze použít i během nošení kontaktních čoček.

Složení:

LipozonEye (ozonovaný slunečnicový olej, sójové fosfolipidy), hydroxypropylmethylcelulóza, kyselina boritá, tetraboritan sodný, edetát sodný, PHMB, čištěná voda.

Varování:

- Před použitím přípravku si důkladně umyjte ruce;
- Přípravek nepoužívejte, pokud jste alergický(á) na kteroukoli jeho složku;
- Po každém použití lahvičku pevně uzavřete;
- Přípravek nepoužívejte déle než 28 dnů od prvního otevření;
- Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na lahvičce;
- Skladujte při teplotě mezi 8 a 25 °C;
- Uchovávejte mimo dosah dětí;
- Není určeno k vnitřnímu užití;
- Přípravek nepoužívejte, pokud je obal poškozený;
- Pokud se objeví jakákoli nežádoucí reakce, přestaňte přípravek používat a poradte se se svým lékařem;
- Ujistěte se, že špička lahvičky nepřichází do kontaktu s okem;
- Podávejte přípravek v rozestupu nejméně 5 minut před nebo po podání jiných přípravků pro lokální oční použití;
- Mírná změna opalescence očního roztoku nepředstavuje změnu kvality produktu.

8 ml

FB VISION S.p.A.
Via San Giovanni Scafa
San Benedetto del
Tronto (AP) Itálie/
Taliansko/ Itálie
fb-vision.it

**STERILE A**